

ProlImplant

Okamžité ošetření provizorní náhradou

Systém LASAK ProlImplant umožňuje nabídnout pacientům s vysokými nároky na estetiku provizorní fixní náhradu pro období hojení extrakčních ran, vhojování implantátů nebo augmentátů a v dalších indikacích. Kromě estetického benefitu a zvýšeného komfortu pro pacienta, poskytuje kotvení dočasných fixních protetických náhrad na implantáty ProlImplant ochranu augmentovaným oblastem i trvalým dentálním implantátům.

ProlImplant je jednodílný provizorní implantát se závitem o průměru 2,1 mm, který je k dispozici ve třech různých délkách 7, 10 a 14 mm. Implantace provizorního implantátu s použitím zaváděcího klíče/Unigripu a speciálního paralelizátoru je přehledná a jednoduchá. Pomocí stejných nástrojů lze provizorní implantát po vhojení trvalých dentálních implantátů, nejpozději však do šesti měsíců, explantovat.


Indikace:

- Fixace okamžitých fixních provizorních náhrad
- Ochrana měkkých tkání během vhojovací fáze implantátů
- Ochrana augmentovaných oblastí

Kontraindikace:

- Nedostatečná nabídka nebo kvalita kosti
- Nedostatek kortikální kosti pro stabilitu implantátu ProlImplant

Další informace o indikacích a kontraindikacích naleznete v návodu k použití.

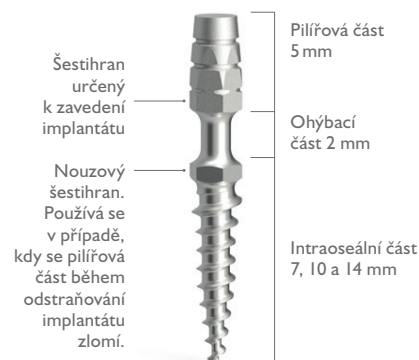


POSTUP KROK ZA KROKEM

1. Při plánování provizorních implantátů ProlImplant je třeba zohlednit následující body:
 - Optimální pozice trvalých implantátů nesmí být umístěním provizorních implantátů ProlImplant nijak ovlivněna.
 - Minimální vzdálenost provizorního implantátu ProlImplant od trvalého implantátu musí být alespoň 3 mm.
2. Lože implantátů ProlImplant se připravují pomocí speciálního vrtáku Ø1.5. U kosti denzity D3, D4 je třeba preparaci štoly redukovat. Umístěte implantát ProlImplant do zaváděcího klíče a implantát zašroubujte do kosti, dokud nebude celý závit implantátu zanořený. Samořezný tvar závitové intraoseální části zajišťuje zhotovení závitu během šroubování. V denzní kosti lze ProlImplant zavádět také pomocí Unigripu a ráčný systému BioniQ®. Při implantaci lze použít nástroj Extend driver pro přesné osově vedení během zavádění a snadné zavádění do všech typů kostí. Implantáty musí být v kostním lůžku stabilní a nesmí docházet k žádnému pohybu.
3. Použití paralelizátorů pomáhá lépe vizualizovat paralelitu implantátů ProlImplant. ProlImplant je možné v ohýbací části opatrně ohnout až o 20 stupňů. Vyhněte se opakovanému ohýbání tam a zpět, které může negativně ovlivnit stabilitu provizorního implantátu ProlImplant a způsobit odlomení abutmentu.
4. Provizorní náhradu lze zhotovit buď přímo v ordinaci, nebo v laboratoři. Při přímé technice se používá buď pacientova zubní protéza nebo lze použít akrylovou zubní náhradu.
5. Pro nepřímou metodu jsou k dispozici manipulační implantáty (analogy implantátů). Pomocí otiskovacích kapen pořídte otisk do pružné otiskovací hmoty. Na rozhraní implantátu a tkáně použijte otiskovací materiál typu Light body. Zhotovený otisk s manipulačními implantáty se zalije do sádry typu Stone a technik může zhotovit provizorní náhradu.

Před použitím implantátu je nutná parní sterilizace v autoklávu (parním sterilizátoru). Pro tento způsob sterilizace se používají programy s teplotou 121 °C (minimální doba expozice 20 min) nebo s teplotou 134 °C (minimální doba expozice 4 min).



Implantáty Prolimplant

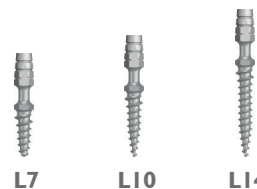

	L7	L10	L14
D2.1	5102.3	6102.3	7102.3



Nástroje

Zaváděcí klíč	2344.3
Paralelizátor	1324.3
Vrták finální Prolimplant D2.1/d1.5	01314.3



Chirurgický set Prolimplant

Chirurgický set Prolimplant (Zaváděcí klíč, paralelizátor – 2 ks, vrták)	1134.3
---	--------



Otiskovací a laboratorní komponenty

Otiskovací kapna pro uzavřenou metodu	133.3
Manipulační implantát, bez retence – úzký	313.3



Zavaděč ruční

Zavaděč ruční	4214.3
---------------	--------



Ráčna

Ráčna	2408.00
-------	---------



Unigrip

Unigrip, hex 2.5/ISO/L16	2459.00
--------------------------	---------

ZÁRUKA:

Schopnost dočasných implantátů Prolimplant odolávat okluznímu zatížení může v průběhu času klesat. Léčebné plány vyžadující dlouhodobé provizorní náhrady tak mohou překročit dobu schopnosti implantátů Prolimplant zajistit stabilitu provizorní náhrady. Na implantáty Prolimplant se nevztahuje doživotní Záruka LASAK. V případě vady materiálu je Záruka LASAK omezena na možnost výměny vadného implantátu za nový nebo úhradu ceny vadného kusu bez jakýchkoli případných souvisejících nákladů. V takovém případě je třeba vadný výrobek vrátit společnosti LASAK spolu s vyplněným Formulářem záručního programu LASAK. Společnost LASAK v žádném případě neodpovídá za jakékoli nepřímé nebo dodatečné škody.

IFU-000022 Rev.[01] 2022-09-12



LASAK s.r.o. • Českokobrodská 1047/46 • 190 01 Praha 9 – Hloubětín

• tel.: +420 224 315 663 • fax: +420 224 319 716 • e-mail: objednavky@lasak.cz • www.lasak.cz